

Z Dexcomu G6 na **Dexcom G7**



NÁVOD K PŘECHODU NA G7

S přechodem na nový systém se mohou objevit otázky. Proto jsme vytvořili tento přehled, který vám pomůže s přechodem na Dexcom G7. Dexcom G7 je naším nejpokročilejším systémem pro kontinuální monitoraci hladiny glukózy (CGM), který byl navržen s novými vylepšeními vycházejícími z vaší zpětné vazby. Senzor je o 60 % menší, je diskrétnější, přesnější a snáze se používá. Díky tomu je pro vás zvládnání diabetu jednodušší.¹

SNADNÉ SPUŠTĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ



JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

Senzor a vysílač v jednom s návodem pro spuštění a s poučnými tipy



DOBA ZAHŘÍVÁNÍ 30 MINUT

Doba zahřívání pouze 30 minut. Dodatečná 12hodinová doba na výměnu senzoru¹



SNADNÉ ZAVEDENÍ

Snadné zavedení pomocí jednoho stisknutí¹

PŘESNÝ A PROPOJENÝ



PŘESNÝ

Naše nejpřesnější technologie CGM usnadňující rozhodování o léčbě



KONEKTIVITA

Dexcom G7, stejně jako Dexcom G6, funguje s inzulínovými pumpami, pery a zdravotními aplikacemi



ZDKONALENÝ BLUETOOTH

Bluetooth senzoru Dexcom G7 má dosah až 10 metrů a přispívá tak k silnému a spolehlivému připojení k vašemu chytrému telefonu

PŘÍZPŮSOBENÝ VAŠIM OSOBNÍM POTŘEBÁM



NOVÉ MOŽNOSTI VÝSTRAH

Individuálně nastavitelné výstrahy a nové možnosti, jako je odložení 1. výstrahy vysoké hladiny glukózy a tichý režim pro větší flexibilitu



FLEXIBILITA ZOBRAZENÍ ÚDAJŮ

Prohlížejte si hodnoty glukózy na třech typech zařízení - chytrém telefonu, přijímači a chytrých hodinkách

Váš senzor je schopen posílat údaje přímo do vašich hodinek Apple prostřednictvím Bluetooth (není zapotřebí telefon).⁵



VODOTĚSNÝ

Přizpůsobí se vašemu životnímu stylu¹

PŘEJDĚTE S LEHKOSTÍ Z DEXCOM G6 NA DEXCOM G7 HNED TEĎ

JAK NASTAVIT SYSTÉM DEXCOM G7



Pokud používáte chytrý telefon, začněte zde

1. Zkontrolujte kompatibilitu vašeho chytrého zařízení na adrese dexcom.com/compatibility.
2. Stáhněte si aplikaci Dexcom G7 z Apple Store nebo Google Play Store.
3. Přihlaste se do svého stávajícího účtu a podle pokynů nastavte aplikaci.



Pokud používáte přijímač, začněte zde

1. Ujistěte se že používáte přijímač Dexcom G7.
2. Aplikujte si senzor. K dispozici je volitelná krycí náplast, díky níž zůstane váš senzor během relace pevně na místě.
3. Své naměřené hodnoty získáte po krátkém 30minutovém zahřívání.

TIPY K PŘECHODU NA G7

Mohu se stále připojit ke své stávající inzulinové pumpě?

Dexcom G7 je integrován s nejnovějšími inzulinovými pumpami, pery a zdravotními aplikacemi. Aktuální informace o kompatibilitě a pokyny k párování najdete na webových stránkách výrobce vašeho zařízení. Konkrétní kroky se budou u jednotlivých inzulinových pump, per nebo propojených zařízení lišit.

Mohu používat svůj přijímač Dexcom G6 se zařízením Dexcom G7?

Ne, komponenty Dexcom G6 nejsou kompatibilní se zařízením Dexcom G7. Pokud máte zájem o přijímač Dexcom G7, kontaktujte prosím **A.IMPORT.CZ na info@aimport.cz nebo na tel. 800 100 261.**

Jsou můj telefon nebo chytré hodinky kompatibilní se zařízením Dexcom G7?

Navštivte stránky dexcom.com/compatibility a zkontrolujte, zda je vaše zařízení kompatibilní se systémem Apple nebo Android.

Musím si vytvořit nový účet Dexcom Clarity nebo Dexcom Follow?

Ne, pokud přecházíte ze zařízení Dexcom G6, nepotřebujete nový účet. Jednoduše používejte své stávající uživatelské jméno a heslo ve všech aplikacích Dexcom. Vaše sledující osoby budou také automaticky synchronizovány.

NYNÍ S JEŠTĚ VÍCE FUNKCEMI, KTERÉ SI OBLÍBÍTE



BUĎTE DISKRÉTNÍ S TICHÝM REŽIMEM

Výstrahy přizpůsobte svému životnímu stylu – ideální pro chvíle, kdy se potřebujete soustředit bez vyrušování



PŘIZPŮSOBTE SVÝM POTŘEBÁM S ODLOŽENÍM PRVNÍ VÝSTRAHY VYSOKÉ HLADINY GLUKÓZY

Přizpůsobte svou první výstrahu vysoké hladiny glukózy svým potřebám, abyste tak omezili vyrušování a výskyt hypoglykémie po podání inzulínu

	Dexcom G6	Dexcom G7
SENZOR		
Senzor a vysílač v jednom	–	✓
Zahřívání	2 hodiny	30 minut
12hodinová doba na výměnu senzoru	–	✓
Výkonnost ve vodě	Voděodolný	Vodotěsný ¹⁾
Rychlé připojování přes Bluetooth	–	✓
FUNKCE		
Individuálně nastavitelný zvuk a hlasitost	✓	✓
Výstrahy vysoké a nízké hladiny glukózy	✓	✓
Urgentní výstraha rizika nízké hladiny glukózy	✓	✓
Odložení 1. výstrahy vysoké hladiny glukózy	–	✓
Tichý režim	–	✓
Plán výstrah	✓	✓
KOMPATIBILITA		
Standardní režim chytrých hodinek	✓	✓
Režim Přímě do hodinek ⁵⁾	–	✓
Bezproblémová integrace s vybranými inzulinovými pumpami, pery a zdravotnickými partnery	✓	✓

Jsmo tu pro vás, abychom vás podpořili v procesu přechodu na G7.

Zjistěte více na www.dexcom.com/cs-CZ/g6-transition.



Systém kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G6 a Systém kontinuální monitorace hladiny glukózy Dexcom G7 (označovan také jako CGM Dexcom G7) jsou zdravotnické prostředky určené ke kontinuálnímu měření glukózy v intersticiální tekutině. Čtěte pečlivě návody k použití a informace k jejich bezpečnému používání a seznamte se s možnými riziky při používání zdravotnických prostředků v souladu s jejich účelem. Vhodnost léčby zdravotnickým prostředkem, vyhodnocení léčby a změny léčby vždy konzultujte s lékařem. Pokud výstrahy hladiny glukózy a naměřené hodnoty z CGM Dexcom G6 nebo CGM Dexcom G7 neodpovídají příznakům nebo očekáváním, použijte pro rozhodování a léčbu diabetu glukometr.

⁵⁾Chytrá zařízení se prodávají samostatně. Pro spárování nového senzoru Dexcom G7 s kompatibilními hodinkami Apple Watch je zapotřebí kompatibilní chytrý telefon. Pro využití funkcí Share/Follow musí být chytrý telefon umístěn ve vzdálenosti do 10 metrů. ¹⁾Senzor Dexcom G7 je vodotěsný a lze jej ponořit do vody až 2,5 metru hluboko na dobu až 24 hodin. ¹⁾Uživatelská příručka Dexcom G7 | Dexcom, Dexcom Clarity, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share a všechna příbuzná loga a značky jsou registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami společnosti Dexcom, Inc. ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích. ©2025 Dexcom, Inc. Všechna práva vyhrazena. REV 03/2025