

Postup pro stažení denních grafů z Dexcom Clarity

Přejděte v internetovém prohlížeči na přihlašovací stránku: <u>https://clarity.dexcom.eu/?&locale=cs-CZ</u>



Po přihlášení přejděte na záložku Přehled, kde pomocí ikonky tužky nastavte rozmezí dat, pro která chcete grafy stáhnout nebo můžete použít např.: počet dní 30, což odpovídá posledním 30 dnům.

Zprávy	Přehled	
Přehled	11 Dny/Dní pá 25. říj 2024 - po 4. lis 2024 🖍	
Vzorce	Počet dní (nejnovější):	
Trendy		Čas v rozmezí
Překrytí	Příp. vyberte vlastní rozmezí dat: Datum začátku: Datum ukončení:	0 % Velmi Vysoký 0 % Vysoký
Denní	25.10.2024 04.11.2024	0 % Nízká
Porovnat	OK Zrušit	0 % Velmi Nízký Cílové rozmezí:
Statistika		3,9-10,0 mmol/L
AGP		

Poté přejděte v levé části na záložku Denní a pomocí ikony 🛃 pro stahování zprávu uložte.

	Zprávy Nahrát Nastavení Podpora ▼	Kar
Zprávy	Denní	
Přehled	14 Dny/Dní ne 20. říj 2024 - so 2. lis 2024 🖍	ē ⊎
Vzorce		▼ POUŽI
Trendy		
Překrvtí	so 2. lis 2024	
Denní		22,5
Porovnat		17,5
Statistika		15,0
AGP	10.0	10,0
	33	5,0
	Nejsou k dispozici žádné události CGM	2,5
	0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00	0:00
	Zobrazit detaily události 🐱	
		-

III CLARITY	Zprávy Nahrát Nastav	ení Podpora 💌			К
Zprávy	D Stáhnout				
Přehled	14	14 Dny/Dní ne 20. říj 20)24 - so 2. lis 2024 🧪		¢
Vzorce		/vberte zprávu, kterou chcete	uložit iako soubor PDF:	ÁLOSTI	• POU
Trendy		,,	,		
Překryti					
Denní		blad			22,5
Porovnat			d Denni D Polovnat		17,5
Statistika					15,0
AGP		Denní statistika	rá statistika 🗆 AGP		7,5
					5,0 2,5
		Barevný rež	žim:	21:00	0.00
		Barva) Černobílý		
		Uložit zprávu	Zavřít		

Takto uloženou zprávu přiložte k reklamačnímu formuláři.