

Postup pro stažení denních grafů z Glooko

Přejděte na přihlašovací stránku https://eu.my.glooko.com/users/sign_in?locale=cs
a přihlaste se do svého účtu Glooko.

glooko
Usnadněte si řízení diabetu

Čeština ▼

Přihlášení

E-mail (Uživatelské jméno)


Heslo

[Zapomenuté heslo](#)
[Nedostali jste pokyny ohledně odemčení?](#)

Přihlášení


[Přihlaste se pomocí SSO](#)
[Nemáte účet? Zaregistrujte se v Glooko zde](#)

Poté zvolte Vytvořte zprávu PDF.

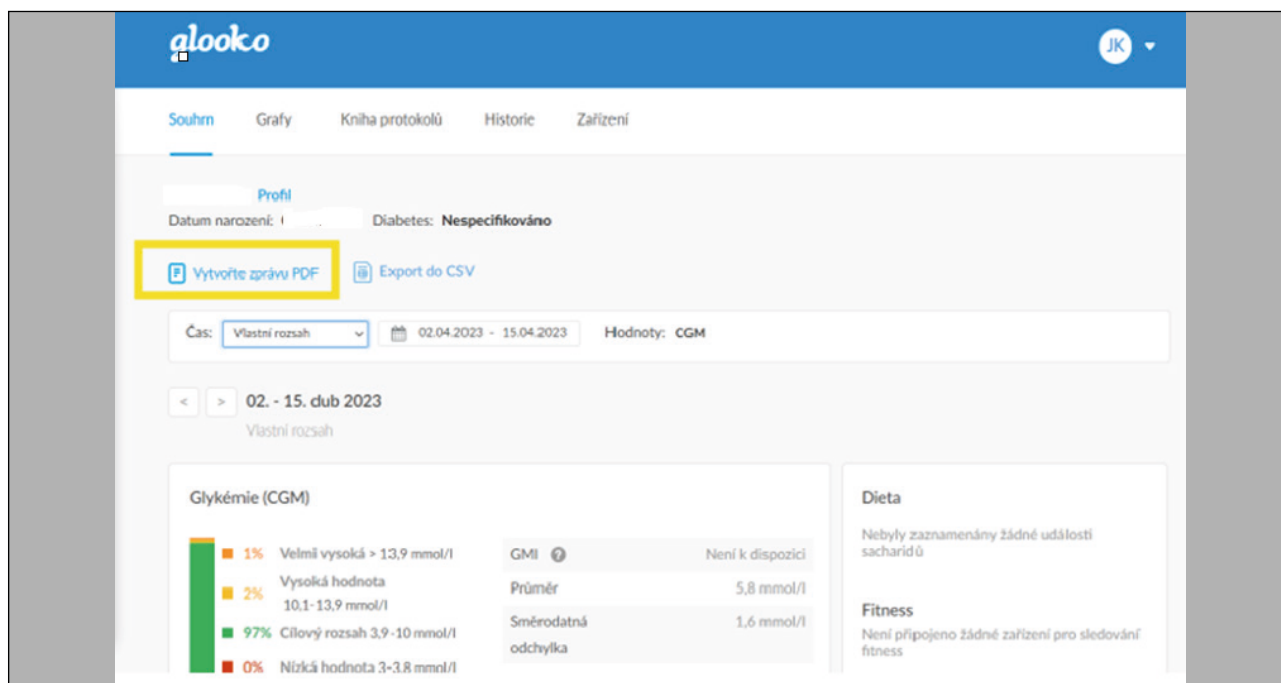

Zvolte Vlastní rozsah a vyberte rozmezí dat pro období reklamovaného senzoru (poté klikněte na Použít).

Zvolte Denní přehled z nabízených možností a zvolte Vytvořit PDF.

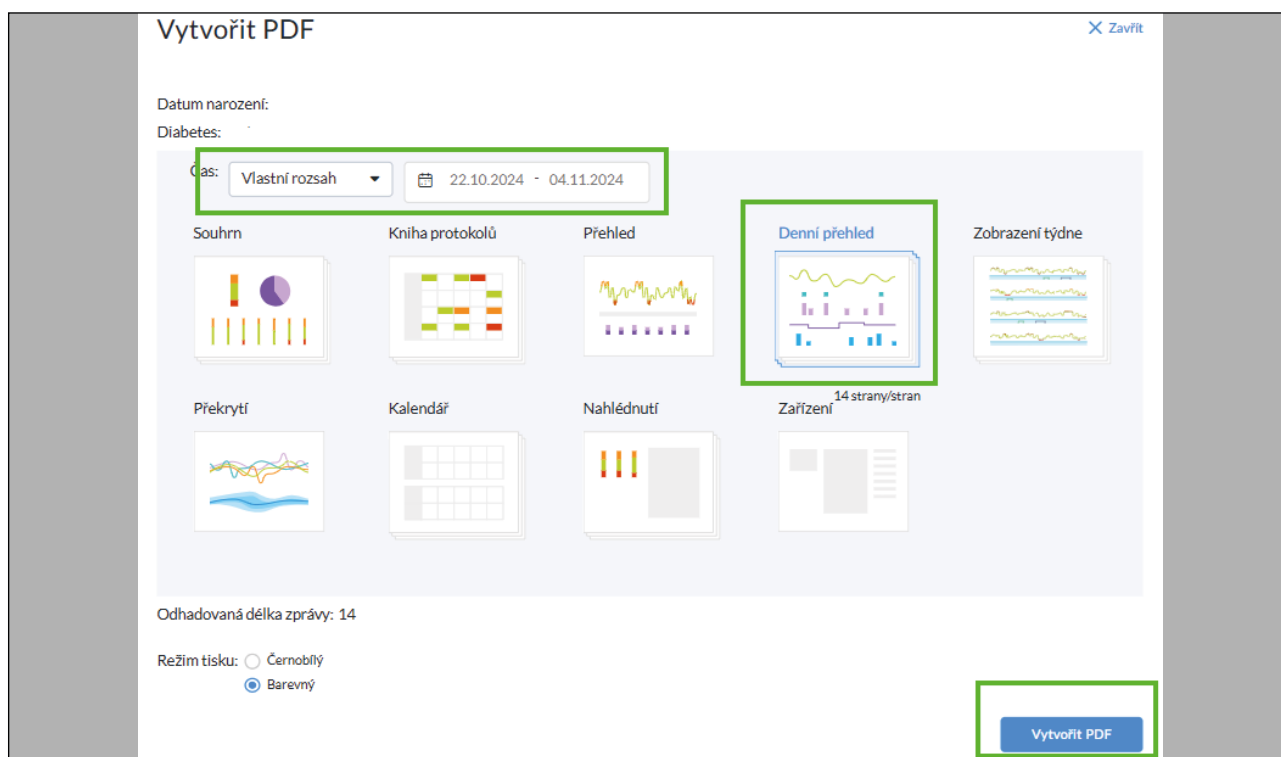

Vygenerovanou zprávu stáhněte pomocí ikonky níže, uložte a přiložte k reklamačnímu formuláři.

